

## Die FRIADENT® TempBase



Dr. J. Neugebauer, Köln/D



Dr. M. Degidi, Chieti/I (3x)

### Implantat- insertion:

Die farb-kodierte **FRIADENT® TempBase** dient als Implantathalter und Einbringpfosten. Sie ist im Lieferumfang der XiVE® OP-Sets Schraubenimplantat enthalten und im Implantat vormontiert.



Sollte während des Insertionsvorgangs ein Drehmoment von **50 Ncm** erreicht werden, TempBase entfernen und Implantat mit dem entsprechenden Instrumentarium direkt über den Implantatsechskant eindrehen. Eine Beschädigung der TempBase wird so vermieden.

Zum Entfernen der FRIADENT® TempBase Halteschraube TempBase mit Hilfe des FRIADENT® Hex-Schraubendrehers 0,9 mm lösen und TempBase entnehmen. Implantat-Verschlusschraube mit dem FRIADENT® Hex-Schraubendreher 0,9 mm in das Implantat einschrauben.

### Intra- operativer Index- abdruck:


Bei zusätzlicher Verwendung der **TempBase Cap** (bitte gesondert bestellen) ermöglicht die **FRIADENT® TempBase** die Indexregistrierung zur Übertragung der klinischen Implantatposition auf das Meistermodell für die einfache und sichere Herstellung eines Provisoriums.



### Temporäre Sofort- versorgung:



Die **FRIADENT® TempBase** wird in Verbindung mit der **TempBase Cap** zum temporären Kronenaufbau für die Anfertigung einer einfachen temporären Sofortversorgung (Einzelzahn- oder Multiimplantat-provisorium). Bei komplexeren Restaurationen erfolgt eine Verblockung mit einer Verstärkung aus Faser-material, die in der Nut der TempBase Cap fixiert wird.

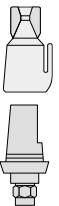



## FRIADENT® Prothetik auf XiVE® Implantaten



FRIADENT bietet für seine XiVE® S und FRIALIT® Implantate das Konzept der Plattformtechnologie: Eine identische Implantat-Aufbau-Verbindung für beide Implantat-

designs ermöglicht ein einheitliches Vorgehen ab Implantat-Oberkante.

Die Rotationssicherung und Stabilisierung der Aufbauteile erfolgt über die patentierte interne Implantat-Aufbau-Verbindung.

Durchmesservarianten XiVE® und FRIALIT®

	D 3,0	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5	D 6,5
XiVE® S	●	●	●	●	●	●
FRIALIT®	●	●	●	●	●	●
XiVE® TG						

Dank aufeinander abgestimmter Implantatdurchmesser von XiVE® und FRIALIT® können für beide Systeme die gleichen FRIADENT® Prothetik-Aufbauten verwendet werden.



Bestell-Nr. 6-701017/002

CE für FRIADENT Medizinprodukte der Klasse I

CE 0123 für FRIADENT Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb, III

Hersteller und Vertrieb Deutschland: FRIADENT GmbH · Steinzeugstraße 50 · D-68229 Mannheim · Tel. (06 21) 43 02-010 · Fax (06 21) 43 02-011 · e-Mail: info@friadent.de · Internet: http://www.friadent.de  
 Vertrieb Österreich: DeguDent Austria Handels GmbH · DENTSPLY Friadent Implant Division · Liesinger Flur-Gasse 4 · A-1235 Wien · Tel. 01/205 1200-0 · Fax 01/205 1200-5374 · e-Mail: office@degudent.at  
 Vertrieb Schweiz: FRIADENT Schweiz AG · Weyeremat 55 · Telefax 0 32/3 31 23 45 · e-Mail: info@friadent.ch